



# Tissue-Tek<sup>®</sup> VIP<sup>™</sup> 5

SAKURA

## Automate à Inclusion

Le groupe Sakura continue d'innover avec une nouvelle génération d'automates à inclusion. Sakura maintient fermement sa position de leader et de fabricant d'instruments de haute technologie. L'Automate à Inclusion Tissue-Tek<sup>®</sup> VIP<sup>™</sup> 5 est l'exemple même de produit très innovant dans le sens d'une plus grande efficacité et d'une plus grande fiabilité.



### Référence Description

5214	VIP <sup>™</sup> 5 115 V 60 Hz Modèle de paillasse
5215	VIP <sup>™</sup> 5 115 V 60 Hz reposant sur le sol
5216	VIP <sup>™</sup> 5 220 V 50 Hz Modèle de paillasse
5217	VIP <sup>™</sup> 5 220 V 50 Hz reposant sur le sol

### Caractéristiques

Capacité Jusqu'à 300 cassettes

### Dimensions (L x P x H)

Sur paillasse 120 x 60 x 69 cm  
 Sur sol 60 x 60 x 136 cm  
 Poids 160 kg

Volume de Solution Jusqu'à 3.7 L

Mémoires 20 programmes de traitement  
 2 programmes de nettoyage  
 1 programme pour flush à l'eau chaude  
 100 solutions identifiables

Température de cuve 35°C jusqu'à 50°C

Température d'étuve 45°C jusqu'à 70°C

Pompe d'agitation 4 programmes  
 Entrée et sortie sélectionnables

Pression et vide ajustables

Contrôle des émanations des réservoirs Réservoir d'eau (2.2 l)  
 Filtre à charbon interchangeable

Mode de changement de solutions Automatique ou sur demande

## Fiabilité éprouvée

Tissue-Tek<sup>®</sup> Distributeur:



**Sakura Finetek Europe B.V.**  
 The Netherlands  
 Phone: +31 71 589 83 00  
 Fax: +31 71 589 84 88  
 sakura@sakuraeu.com  
 www.sakura.com

IMAGINEZ...

VERS UNE FIABILITÉ SANS LIMITE



 **Tissue-Tek<sup>®</sup> VIP<sup>™</sup> 5**  
SAKURA

Automate à Inclusion


# Performances et efficacité tout



Avec l'Automate à Inclusion Tissue-Tek® VIP™ 5, Sakura apporte aujourd'hui aux laboratoires d'Histologie et de Cytologie la cinquième génération d'instruments reconnue comme étant un standard d'efficacité et de fiabilité jamais égalées.

Le Tissue-Tek® VIP™ 5, c'est une assistance aux multiples avantages, une aide sans pareil qui saura convaincre les histologistes les plus occupés.

Le Tissue-Tek® VIP™ 5 rationalise et accélère à la fois le traitement des échantillons de tissus. Le Tissue-Tek® VIP™ 5 est le plus en avance des systèmes à inclusion automatiques.

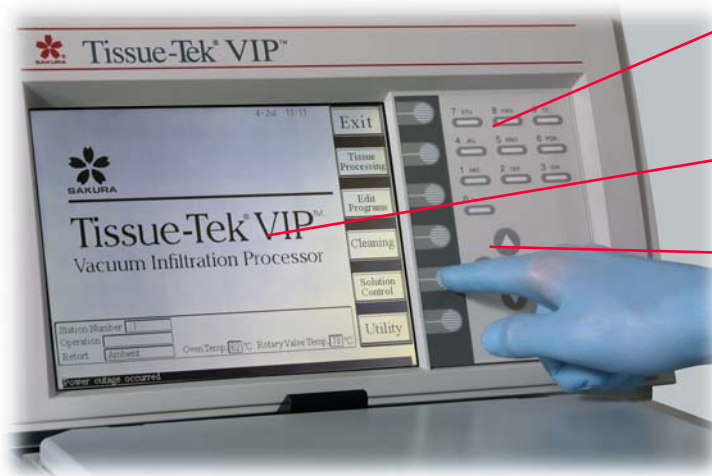

Deux niveaux de mots de passe pour la sécurité de l'instrument et la sécurité des informations importantes.

Un affichage convivial permet de surveiller toutes les informations en un coup d'oeil.

Clavier alphanumérique.

Compartiment de sécurité pour un remplissage et un drainage pratiques.

Pour respecter le personnel et l'environnement, l'instrument est équipé d'un système de filtration combinant eau et charbon actif.



# simplement révolutionnaires



Le rajout de cassettes est facile même si une séquence de traitement a été programmée ou lancée.

Quatre options pour l'agitation, incluant un mode en continu.

Deux détecteurs de niveau afin d'optimiser l'utilisation des réactifs.

Mécanique simplifiée.

Quatre réservoirs de paraffine amovibles.

Un rinçage à l'eau programmable élimine les vapeurs d'alcool dans la cuve.

Clarification de la paraffine –  
Le Tissue-Tek® VIP™ 5 dégage automatiquement la paraffine contenue dans le four et maintient l'intégralité de celle-ci, sans cycle additionnel de nettoyage de cuve.

Transfert de réactifs automatique ou sur demande pendant la séquence de traitement

Le programme "Solution Manager" réagit en cas d'anomalie afin de terminer le cycle en cours

Contrôle automatique de la bonne connexion des flacons

Compteur de cassettes et contrôle de réactifs facilitent la gestion globale du système

Flacons de réactifs plus larges pour une plus grande stabilité

